

Pansements ampoules grand format

5 pansements



Code réf : 050916



Détail produit

PCB : 6
GENCOD : 3160920509162
DLUO : 60 mois.
Statut réglementaire (France):
DM classe II a

Description

Grâce à leur technologie hydrocolloïde, les Pansements grand format Mercurochrome **soulagent la douleur** lors de l'apparition des ampoules et **facilitent leur cicatrisation**. Au contact de l'ampoule, la masse hydrocolloïde forme un gel favorisant la **cicatrisation** des ampoules en créant un milieu humide dermo-reconstituant qui protège les plaies. Ils sont **résistants à l'eau**, souples et permettent de créer un **effet seconde peau** pour protéger la zone sensible des frottements et des pressions subies par vos pieds. L'étui contient 5 pansements ampoules grand format.

Conseils d'utilisation

Appliquer le pansement sur une peau propre et sèche. Ôter le papier protecteur. Décollez délicatement votre pansement de ses protecteurs en évitant de mettre vos doigts sur la partie adhésive. Appliquer la partie centrale du pansement, directement sur l'ampoule. Lisser soigneusement les bords pour optimiser son adhésivité. Attendre quelques jours que le pansement se décolle de lui-même pour le retirer. Renouveler si nécessaire.

Précautions d'emploi

Pour usage externe uniquement.
Ne pas utiliser les pansements hydrocolloïdes sur des ampoules ouvertes ou infectées.
Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.
Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
En cas de doute, consultez votre médecin. Pour les personnes diabétiques, consultez votre médecin avant l'utilisation.
Une éventuelle réutilisation entraîne une perte de performance du dispositif et un risque de contamination.
Lire attentivement les instructions d'utilisation sur l'emballage. Fabricant : ASO LLC. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Mars 2015.