

MASQUE FACIAL À USAGE UNIQUE x 50 PC

Masque facial à usage unique avec bandes élastiques conçu pour empêcher la transmission d'infections et la contamination d'autres personnes.

MODE D'EMPLOI:

Avant de mettre un masque, laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage. Lorsque vous portez un masque, évitez de le toucher. Avant de toucher un masque usagé, lavez vos mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. N'utilisez pas le masque plus de 4 heures.

COMMENT RETIRER LE MASQUE:

Après usage, retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque. Sans toucher le masque jetez-le dans une poubelle fermée. Laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. **Produit à usage unique.** Remplacez le masque immédiatement s'il est mouillé ou endommagé.

COMPOSITION: Polyester 100%, Non-tissé, 130 gr/m²

PRODUIT PAR: S.C. SONYA MOD S.A., Bucarest, 43 Olari, secteur 2

STOCKAGE: CONDITION AMBIANTE

REF: 94115 LOT:

